

Ihr Kit enthält:



1 Haarwaage



1 Papierumschlag



1 Probenbegleitschein




1 Rückumschlag

Hinweise:


- ❗ Keine Haare einsenden, die in den letzten 60 Tagen gefärbt, gebleicht oder dauergewellt wurden. Dazu zählen auch Intensivtönung oder Henna.
- ❗ Vor der Probenentnahme die Haare mindestens 8 Stunden nicht waschen.
- ❗ Nach dem letzten Waschen kein Haarspray, Haarwachs oder ähnliches verwenden.
- ❗ Haare wenn möglich vom Hinterkopf abnehmen, da diese den wenigsten Einflüssen (Sonnenlicht, Stylingprodukten) ausgesetzt sind.
- ❗ Senden Sie keine Strähnen ein, die kürzer als 1 cm oder länger als 3 cm sind.
- ❗ Achten Sie darauf genügend Haare einzusenden. Andernfalls ist keine Analyse möglich.




Achtung: Bitte schicken Sie ausschließlich Kopfhaare zur Analyse ein! Schamhaare oder andere Körperhaare sind für die Analyse nicht geeignet. Sollten Sie andere Haare als Kopfhaare einsenden, können wir weder die Verantwortung für die Interpretation der Laborergebnisse noch die Kosten für eine Nachtestung übernehmen.

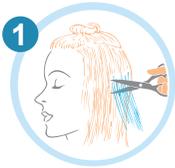

- Schneiden Sie mit einer rostfreien Schere möglichst nahe an der Kopfhaut kleine Strähnen an fünf oder sechs Stellen im Nackenbereich ab.

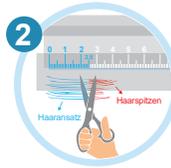

- Von den gewonnenen Haarsträhnen benötigen wir idealerweise die ersten 2,5cm gerechnet vom Haaransatz. Kürzen Sie längere Strähnen entsprechend.

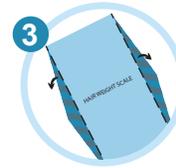

- Mit der beiliegenden blauen Pappwaage können Sie kontrollieren, ob Sie ausreichend Haare gesammelt haben. Falten Sie dazu die Seitenteile der Waage an den dafür vorgesehenen Stellen nach unten, sodass die Seite mit dem Kopfbild nach unten und die mit „Hair Weight Scale“ beschriftete Seite nach oben zeigt.



- Stellen Sie die Waage auf eine ebene Oberfläche. Legen Sie die gekürzten Haarsträhnen in den vorgezeichneten Kasten auf die mit A markierte Seite der Waage, bis diese Seite nach unten kippt. Zur Sicherheit wenn möglich lieber noch eine Strähne mehr hinzufügen.



- Beschriften Sie den beiliegenden Papierumschlag mit Ihrem Namen. Geben Sie die Haarproben lose (kein Tesafilm/ Kunststoffolie, etc.) in den Papierumschlag und verschließen Sie ihn. Falls Sie ein Spezialshampoo nutzen, das konzentrierte Mineralstoffe enthält, können Sie dies ebenfalls angeben.



- Füllen Sie den Probenbegleitschein vollständig aus und legen Sie ihn zusammen mit dem Papierumschlag in die Rückversandtasche. Fertig!