

Anleitung

Beachten Sie bitte folgende Hinweise für die Probenabnahme – die richtige Entnahme ist für die Erzielung unverfälschter Laborergebnisse wichtig! Vergessen Sie nicht Ihren Namen und das Datum der Entnahme auf dem Transportröhrchen zu notieren.



Ihr Kit enthält:

- ✓ Diese Anleitung
- 1 Urin Sammelbecher
- 1 Transportröhrchen
- 1 Pipette
- 1 Probenschutzbeutel
- 1 Saugvlies

Sicherheitshinweise:

Das Medium des Aufnahmeöhrchens kann örtlich begrenzt Hautreizungen Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. Waschen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife, wenn Sie mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen. Bei anhaltender Reizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen.


Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.

Beachten Sie

Urinieren Sie mindestens 1 Stunde vor der Entnahme Ihrer Urinprobe nicht.

Verwenden Sie den ersten Urinstrahl Ihres Morgenurins.


Wenn die Urinprobe nicht sofort in das Transportröhrchen überführt werden kann, kann sie bis zu 24 Stunden bei 2-30 ° C gelagert werden.

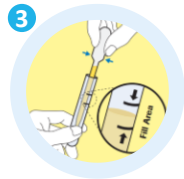

- ➔ Für das korrekte Füllvolumen kann es erforderlich sein, den Urin mehr als einmal von Becher zu Röhrchen zu pipettieren.
- ➔ Die richtige Menge ist erreicht, sobald der Flüssigkeitsstand zwischen den beiden Markierungen auf dem Röhrchen befindet. **Über- oder Unterschreiten Sie diese nicht.**



- ➔ Waschen Sie Ihre Hände. Öffnen Sie den Urinauffangbecher. Vermeiden Sie eine Verunreinigung der Becherinnenseite durch Ihre Hände.
- ➔ Sammeln Sie den ersten Teil des Urins in den Urinauffangbecher. Füllen Sie etwa 1/3 des Behälters.

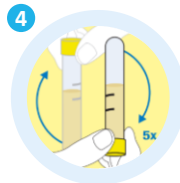

- ➔ Verschließen Sie das Transfer-röhrchen wieder fest, um ein Auslaufen zu verhindern.
- ➔ Drehen Sie das Röhrchen fünfmal um, um sicherzustellen, dass Probe und Reagenz gemischt werden.
- ➔ Entsorgen Sie den Auffangbecher und die Pipette.



- ➔ Übertragen Sie den Urin sofort mit der mitgelieferten Einwegpipette in das Transportröhrchen mit dem Stabilisierungsreagenz.
- ➔ Vermeiden Sie ein Verschütten des Inhalts. Reinigen Sie das Röhrchen von außen, falls nötig.



- ➔ Legen Sie das beschriftete Transportröhrchen in den Schutzbeutel mit dem Saugvlies und verschließen Sie diesen sorgfältig.
- ➔ Platzieren Sie die Probe und den Probenbegleitschein in die graue Rückversandtasche für den Versand.