

Anleitung

Beachten Sie bitte folgende Hinweise für die Probenabnahme – die richtige Entnahme ist für die Erzielung unverfälschter Laborergebnisse wichtig! Vergessen Sie nicht Ihren Namen und das Datum der Entnahme auf des Transportröhrchen zu notieren.



Ihr Kit enthält:

- ✓ Diese Anleitung
- 1 Abstrich
- 1 Transportröhrchen
- 1 Probenschutzbeutel
- 1 Saugvlies

Sicherheitshinweise:


Das Medium des Aufnahme Röhrchens kann örtlich begrenzt Hautreizungen Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen. Waschen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife, wenn Sie mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen. Bei anhaltender Reizung: ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bewahren Sie das Kit unzugänglich für Kinder auf.

Beachten Sie

Nehmen Sie keinen Abstrich während Ihrer Menstruation.


Fordern Sie ein neues Probenentnahmeset an, wenn die weiche Spitze berührt wird, das Stäbchen herunterfällt oder der Inhalt des Röhrchens verschüttet wird.

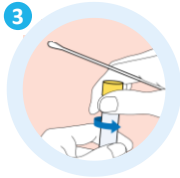


- ➔ Öffnen Sie das Probenröhrchen dafür ohne den Abstrich aus der Hand zu legen oder den Inhalt des Röhrchens zu verschütten.
- ➔ Achten Sie darauf mit dem Wattestäbchen keine weiteren Oberflächen, auch nicht Ihre Haut, zu berühren.



- ➔ Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Nehmen Sie eine bequeme Stellung ein (beispielsweise als wollten Sie einen Tampon einführen).
- ➔ Halten Sie das Wattestäbchen in einer Hand, während Sie mit der anderen die Schamlippen spreizen.

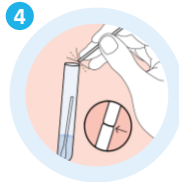

- ➔ Führen Sie den Abstrich in das Probenröhrchen ein, bis die Stäbchenkerbe (Bruchstelle) und die Öffnung des Transportröhrchens auf gleicher Höhe sind.
- ➔ Biegen Sie das Stäbchen, bis es abbricht. Und drehen Sie den Verschluss auf das Röhrchen.

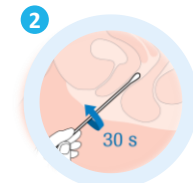

- ➔ Führen Sie das Wattestäbchen etwa 5 cm in die Scheide ein.
- ➔ Streichen Sie das Stäbchen in einer rotierenden Bewegung an der Vaginalwand entlang. Stellen Sie sicher, dass das Wattestäbchen die Scheidenwand für **ca. 15 sek** berührt.



- ➔ Legen Sie das Transportröhrchen in den Schutzbeutel mit dem Saugvlies und verschließen Sie diesen sorgfältig.
- ➔ Platzieren Sie die Probe und den Probenbegleitschein in die graue Rückversandtasche für den Versand.