


Anleitung Histaminmessung im Stuhl

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor der Probenentnahme vollständig durch.
Proben bitte nur montags oder dienstags einschicken.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise für die Stuhlentnahme – die richtige Stuhlentnahme ist für die Erzielung unverfälschter Laborergebnisse wichtig! Bitte beachten Sie, dass nicht ausreichend verschlossene Proben, an die Luft herankommt, nicht analysiert werden können. Für eine erneute Zusendung des Testkits berechnen wir Ihnen 6,90 € Material- und Versandkosten.

Vor der Probenentnahme

1. Bitte beachten Sie, dass eine Medikamenteneinnahme oder Alkoholkonsum das Testergebnis beeinflussen können. Geben Sie beides auf dem Probenbegleitschein an.
2. Beschriften Sie das Röhrchen an den vorgesehenen Stellen, füllen Sie den beiliegenden Probenbegleitschein vollständig aus und unterschreiben Sie ihn.

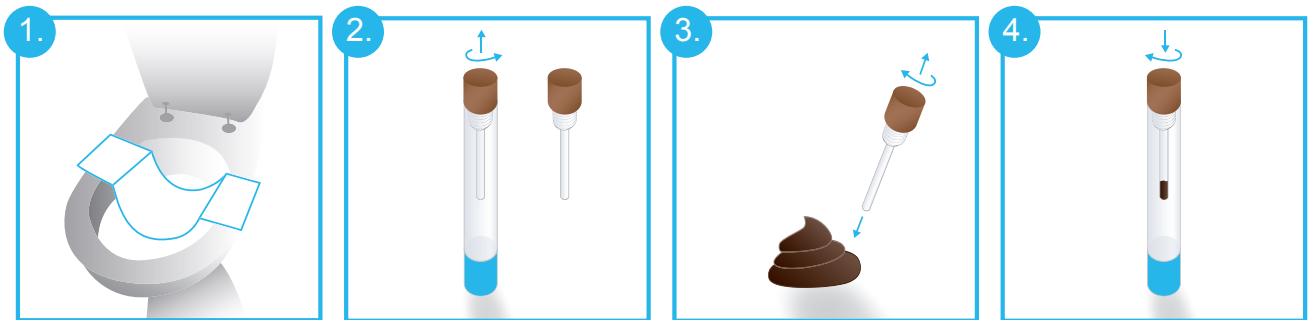

Während der Probenentnahme

1. Benutzen Sie den beigegefügt Stuhlfänger um zu vermeiden, dass der Stuhl mit dem Toilettenwasser oder Urin in Berührung kommt. Sammeln Sie nun den Stuhl mit Hilfe des Stuhlfängers.
2. Entnehmen Sie das Stuhlröhrchen und schrauben Sie den Entnahmestab (weiß und geriffelt) ab.
3. Stecken sie den weißen Entnahmestab mit der Dosierspitze in die Stuhlprobe. Achten Sie darauf, dass die Öffnung vorne mit Stuhlprobe gefüllt wird und ziehen Sie den Stab mit einer Drehbewegung aus der Stuhlprobe heraus. Bitte füllen Sie lediglich die Spitze des Entnahmestabs mit Stuhl, nicht das ganze Röhrchen.
4. Geben Sie den weißen Entnahmestab zurück in das Röhrchen und schrauben Sie den Entnahmestab fest zu, um ein Auslaufen zu vermeiden.
5. Für die Laboruntersuchung ist es wichtig, dass Ihre Stuhlprobe direkt in der Pufferlösung stabilisiert wird.

Nach der Probenentnahme

1. Das Röhrchen möglichst kühl und lichtgeschützt lagern.
2. Für die Laboruntersuchung ist es wichtig, dass Ihre Stuhlprobe direkt in der Pufferlösung stabilisiert wird.
3. Bitte entnehmen Sie den Stuhl so, dass Sie ihn immer **montags oder dienstags** an unser Labor senden können.
4. Legen Sie die Probe in die durchsichtige Schutztüte und diese zusammen mit dem Probenbegleitschein in die graue Versandtasche. Probenröhrchen und Versandtasche nicht zusätzlich zukleben oder heften. Bitte schicken Sie die Versandtasche unfrankiert an unser Labor zurück. Nach den allgemeinen Postbestimmungen trägt der Absender die haftungsrechtliche Verantwortung.
5. Nach ca. 14 Tagen erhalten Sie Ihr Ergebnis per Post. Wenn Sie Ihr Ergebnis per E-Mail als PDF erhalten möchten, notieren Sie dies bitte auf dem Begleitschein oder geben Sie uns bescheid.