

Ihr Kit enthält:



1 Schutztüte
mit Saugeinlage



1 Urin-Auffangbecher
und 1 Transferpipette



1 Urin-Röhrchen und
1 Transportröhrchen
mit Saugvlies



1 Probenbegleitschein



1 Rückumschlag

Hinweise:

- ❗ Benötigt wird der Mittelstrahlurin Ihres ersten Morgenurins. Darunter versteht man eine Probe, die nicht zu Beginn des Wasserlassens, sondern aus dem bereits laufenden Harnstrahl gewonnen wird.
- ❗ **Hinweis für Frauen:** Entnehmen Sie keine Urinprobe während Ihrer Periode.
- ❗ Bei Rücksendungen aus dem Ausland: Proben nur montags abnehmen und abschicken.
- ❗ Falsch abgenommene Proben können nicht analysiert werden. Für eine erneute Zusendung des Testkits berechnen wir Ihnen erneute Material- und Versandkosten.
- ❗ Bei Temperaturen unter 5 °C und über 30 °C Proben nicht in den Briefkasten werfen, sondern direkt bei der Post abgeben.




Nehmen Sie am Abend vor der Probenentnahme keine größeren Flüssigkeitsmengen (mehr als 1 Liter) zu sich. Seit der letzten Mahlzeit und Flüssigkeitsaufnahme sollten mindestens **8 Stunden** vergangen sein.


Wird bei Ihnen **Jod** getestet, verzichten Sie mindestens 24 Std. vor Probenabnahme auf Jodpräparate und Nahrungsmittel mit außergewöhnlich hohem Jodgehalt, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.



- ➔ Sammeln Sie den Mittelstrahl-Urin Ihres Morgenurins (siehe Hinweise) im Urin-Aufgangbecher.

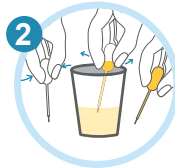

- ➔ Füllen Sie den Urin mit Hilfe der Transferpipette in das kleinere Urin-Röhrchen. Verschließen Sie das volle Urin-Röhrchen fest, um ein Auslaufen zu verhindern und beschriften Sie es.

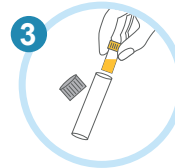

- ➔ Schieben Sie das beschriftete Urin-Röhrchen in das größere Transportröhrchen, ohne das darin enthaltene Saugvlies zu entfernen.



- ➔ Legen Sie das Röhrchen in die durchsichtige Schutztüte mit Saugeinlage und verschließen Sie diese.



- ➔ Füllen Sie den Probenbegleitschein vollständig aus. Achten Sie auch auf Ihre Unterschrift!



- ➔ Legen Sie die Tüte zusammen mit dem Begleitschein in die graue Rückversandtasche und senden Sie diese an unser Labor zurück.