

1. Schritt



WICHTIG – Aktivieren Sie ihr Testkit

- Aktivieren Sie vor dem Probenversand Ihren Test mit Hilfe Ihres Proben-Codes. Ohne Aktivierung kann Ihre Probe nicht bearbeitet werden.
- Legen Sie sich für die Aktivierung selbst (bzw. den Halter) als einsendende Person an. Die Informationen zu Ihrem Tier werden im zweiten Schritt abgefragt.
- Beginnen Sie mit der Probenabnahme erst, wenn die Aktivierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

2. Schritt



Probennahme

- Sammeln Sie an 3 aufeinander folgenden Tagen je eine walnussgroße Kotprobe Ihres Tieres in jeweils einer Probendose.
- Verwenden Sie zum Aufsammeln die beigelegten Holzspatel.

Bei Katzen entnehmen Sie die drei Proben einfach aus der Katzentoilette.

3. Schritt



Lagerung

- Lagern Sie die Proben 1 und 2 bei 2-8° Celsius im Kühlschrank (nicht einfrieren!).

4. Schritt



Verpacken

- Legen Sie die drei Probendosen in die durchsichtige Probentüte mit Saugelinge und verschließen Sie diese.
- **WICHTIG – Auf der Schutztüte befindet sich Ihr persönlicher Proben-Code, den wir zur Zuordnung Ihrer Probe benötigen.**

5. Schritt



Versenden

- Legen Sie die Schutztüte in die graue Rückversandtasse und senden Sie diese an unser Labor zurück.

Tipp: Werfen Sie die Proben montags vor der ersten Leerung ein. Das garantiert den schnellsten Rückversand.

Sa	So	Mo
ABNAHME	ABNAHME	ABNAHME & VERSAND

Wurmtest Tier

Anleitung zur Probenentnahme



Ihr Kit enthält:

- 3 Probendosen
- 3 Holzspatel
- 1 durchsichtige Schutztüte
- 1 Rückumschlag